

～超嗅げる～カラメルの極み

取扱説明書

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項を示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

本製品はご自身で簡易的に嗅覚を刺激、嗅覚トレーニングを行うキットです。

※診断などを行う医療行為ではございません。

注 意

下記の注意事項を守らないと、ケガをしたり周囲の物品に損害を与えたりすることがあります。

- 分解や改造をしない。
- 小さいお子様だけで使用させない。ケガや誤飲の原因となります。万が一、飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。
- アレルギー症状が現れた時にはただちに使用を中止する。
- 香り吹き出し口を人の目に向けて使用しない。
- 内部に水や異物を入れない。におい変化の原因になります。
- 高温下では使用しない。プラスチックが溶けたり、におい変化・劣化の原因となることがあります。
- 容器に強い衝撃を与えない。変形・破裂・故障の原因となります。

使用上の注意

使用方法

1. ボトルのキャップを上を開ける。
2. 鼻から3cmほどに近づける。
3. ボトルを強く押す。

※ボトルを押すとにおいが出てきます。色はありません。2、3回連続で押すと良く嗅ぐことができます。



第一薬品産業株式会社 (URL : <https://j-ichiyaku.com/>)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 15-12 兜町 MOC ビル 6F

TEL : 03-3666-6773 FAX : 03-6206-2662

～超嗅げる～カラメルの極み

取扱説明書

使用について

- においの感じ方については個人差があります。
- においを感じなかった場合は、医療機関にご相談ください。
(嗅覚の低下は様々な要因が考えられます。)
- なるべく他のにおいがしない空間で使用してください。
- 屋外やエアコンの吹き出し口の近くなど風の強いところでは、においが感じにくいことがあります。
- 妊娠中の方は十分にご注意して使用してください。
- 気分が悪くなった場合は、使用をやめてください。

お手入れおよび保管方法

- 嗅ぎ終わった後は、キャップを締め、同梱のケースに入れ保管してください。
- においの変化や劣化につながる恐れがあるため、直射日光のあたる高温の場所や、湿気が多い場所で使用・保管・放置しないでください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

組成・性状（主な仕様）

質量：約 12 g

におい成分を含めた脱脂綿をボトル内に封入

主成分：Sotolone（カラメル様のにおい）希釈溶媒：プロピレングリコール

有効期限：開封後 6 ヶ月

包装：プラスチックボトル（PE）、プラスチックキャップ（PP）、アルミパウチ（アルミ）

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

嗅覚トレーニング

まずは3カ月続けてみましょう

1日2回
朝と晩

12週間
約3ヶ月

トレーニングは
継続することが
重要じゃ。



第一薬品産業株式会社（URL：<https://j-ichiyaku.com/>）

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 15-12 兜町 MOC ビル 6F

TEL：03-3666-6773 FAX：03-6206-2662