

簡易嗅覚ボトル使用製品

【共通】取扱説明書

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項を示しています。

本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

本製品はご自身で簡易的に嗅覚のセルフチェックやトレーニングを行うキットです。

※診断などを行う医療行為ではございません。

注 意

下記の注意事項を守らないと、ケガをしたり周囲の物品に損害を与えたりすることがあります。

- 分解や改造をしない。
- 小さいお子様だけで使用させない。ケガや誤飲の原因となります。万が一、飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。
- アレルギー症状や気分が悪くなった場合にはただちに使用を中止する。
- 香り吹き出し口を人の目に向けて使用しない。
- 内部に水や異物を入れない。におい変化の原因になります。
- 高温下では使用しない。プラスチックが溶けたり、におい変化・劣化の原因となることがあります。
- 容器に強い衝撃を与えない。変形・破裂・故障の原因となります。

使用上の注意

使用方法

1. ボトルのキャップを上を開ける。
2. 鼻から3 cmほどに近づける。
3. ボトルを強く押す。

ボトルを押すとにおいが出てきます。色はありません。

2、3回連続で押すと良く嗅ぐことができます。



簡易嗅覚ボトル使用製品

【共通】取扱説明書

使用について

- においの感じ方については個人差があります。
- においを感じなかった場合は、医療機関にご相談ください。
(嗅覚の低下は様々な要因が考えられます。)
- なるべく他のにおいがしない空間で使用してください。屋外やエアコンの吹き出し口の近くなど風の強いところでは、においが感じにくいことがあります。
- 妊娠中の方は十分にご注意して使用してください。

お手入れおよび保管方法

- 嗅ぎ終わった後は、キャップを締め、においが漏れないよう注意して保管してください。同梱のケースも併用ください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

組成・性状（主な仕様）

質量：約 12 g

におい成分を含めた脱脂綿をボトル内に封入

<成分>

【嗅覚セルフチェック】

VH/VL（低濃度） 主成分：Verdox 溶剤：プロピレングリコール

SH/SL（高濃度） 主成分：Sotolone 溶剤：プロピレングリコール

【かぐや姫の嗅覚トレーニング～シトラス編～】

レモン・ライム・グレープフルーツのエッセンシャルオイル（精油）を使用

【かぐや姫の嗅覚トレーニング～フローラル編～】

サクラ・キンモクセイ・ジャスミン様の調合香料を使用

【カaramelの極み】

主成分：Verdox 溶剤：プロピレングリコール

<有効期限>

開封後 6 ヶ月

<包装>

プラスチックボトル・(PE)、プラスチックキャップ (PP)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

問い合わせ先

第一薬品産業株式会社 (URL：<https://j-ichiyaku.com/>)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 15-12 兜町 MOC ビル 6F

TEL：03-3666-6773 FAX：03-6206-2662