

簡易嗅覚確認キット (VH・VL・SH・SL)

取扱説明書

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項を示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

本製品はご自身で簡易的に嗅覚機能をご確認いただくキットとなります。

※診断などを行う医療行為ではございません。

注 意

下記の注意事項を守らないと、ケガをしたり周囲の物品に損害を与えたりすることがあります。

- 分解や改造をしない。
- 小さいお子様だけで使用させない。
ケガや誤飲の原因となります。万が一、飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。
- アレルギー症状が現れた時にはただちに使用を中止する。
- 香り吹き出し口を人の目に向けて使用しない。
- 内部に水や異物を入れない。
におい変化の原因になります。
- 高温下では使用しない。
プラスチックが溶けたり、におい変化・劣化の原因となることがあります。
- 容器に強い衝撃を与えない。
変形・破裂・故障の原因となります。

使用上の注意

使用方法

1. ボトルのキャップを上を開ける。
2. 本体中央部を親指及び人差し指、中指で押し込み、ボトル内部の空間に含まれるにおいを押し出す。
3. 鼻から3 cmほどの距離でにおいを嗅ぐ。
4. においがするかどうかをセルフチェック。



簡易嗅覚確認キット (VH・VL・SH・SL)

取扱説明書

使用について

- においの感じ方については個人差があります。
特に本品は三叉神経刺激のない合成単一香料を使用しているため、においの感じ方には個人差がございます。
- においを感じなかった場合は、医療機関にご相談ください。
(嗅覚の低下は様々な要因が考えられます。)
- なるべく他のにおいがしない空間で使用してください。
- 屋外やエアコンの吹き出し口の近くなど風の強いところでは、においが感じにくいことがあります。
- 妊娠中の方は十分にご注意して使用してください。
- 気分が悪くなった場合は、使用をやめてください。

お手入れおよび保管方法

- 嗅ぎ終わった後は、キャップを締め、においが漏れないよう注意して保管してください。
- においの変化や劣化につながる恐れがあるため、直射日光のあたる高温の場所や、湿気が多い場所で使用・保管・放置しないでください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

組成・性状 (主な仕様)

質量：約 12 g

以下のにおい成分 (1 g) を含めた脱脂綿をボトル内に封入

型式 (※)	濃度	主成分	溶剤
VH	高濃度	Verdox	プロピレングリコール
VL	低濃度	(青りんご様のにおい)	
SH	高濃度	Sotolone	
SL	低濃度	(カラメル様のにおい)	

※型式はラベルの製品名横に記載

有効期限：開封後 3 ヶ月 または 製造から 1 年以内 (ラベルに記載)

包装：プラスチックボトル (PE)、プラスチックキャップ (PP)、製品表示ラベル (紙)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

問い合わせ先

第一薬品産業株式会社 (URL : <https://j-ichiyaku.com/>)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 15-12 兜町 MOC ビル 6F

TEL : 03-3666-6773 FAX : 03-6206-2662