

# においスティック (英語名: OSIT-J)

## 準備

検査の30～60分前に冷蔵庫から取り出す  
①においスティック ②選択肢カード  
③回答用紙 ④薬包紙(台紙付)



## ◎使用手順

12種類繰り返し


### 手順1

検査者はスティックを1本取り出す



### 手順2

薬包紙を1枚取り出し、台紙の上に重ねる

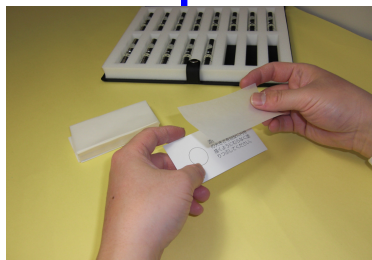

### 手順3

キャップを開け、におい部分を出す(3～5mm程度)




**手順4** 薬包紙に塗りつけ(直径2cmの円を5周くらい)、  
塗った側を内側にして半分に折り、被検者に渡す



### 手順7

検査者は選ばれた選択肢を回答用紙に記入する

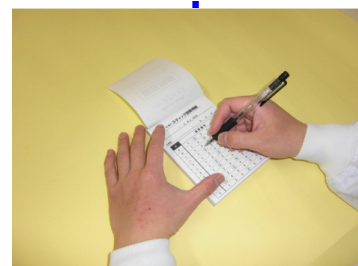

### 手順6

選択肢カードを前において、選択肢を見ながら  
薬包紙を鼻に近づけ、開いてにおいを嗅ぐ



### 手順5

被検者は薬包紙を3～5回擦り合わせる  
(被検者が自分でできない場合は検査者が行う)

